

INSTYLAN

80 mg

50 ml

solución estéril a base del ácido hialurónico para instilación intravesical



Recuperación del
funcionamiento de la
barrera **NATURAL** de
la vejiga urinaria en
caso de cistitis


INSTYLAN

80 mg

50 ml

solución estéril a base del ácido hialurónico para instilación intravesical

- ▼ es un componente de los glicosaminoglicanos (GAG) que se encuentran en altas concentraciones en la capa sub-epitelial en la pared de vejiga
- ▼ forma la membrana visco-elástica en la superficie de la mucosa
- ▼ regenera y protege la capa dañada de los GAG de la mucosa de la vejiga
- ▼ facilita recuperación del urotelio dañado
- ▼ reduce irritación de la vejiga y facilita eliminación del dolor
- ▼ facilita normalización de la micción

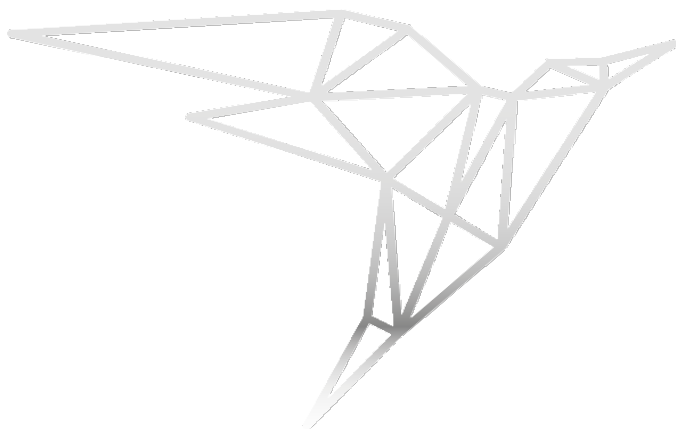

Diaco
BIOFARMACEUTICI

DIACO Biofarmaceutici S.R.L.
Via Favia 124, 34147 Trieste, Italy

www.diaco.it

INSTYLAN

COMPOSICIÓN CUALITATIVA

Hialuronato de Sodio

Excipientes: agua para inyecciones, cloruro de sodio, tampón fosfato.

CLASIFICACION DEL PRODUCTO

Dispositivo médico estéril y no pirógeno. Clase IIa.

ENVASADO

Bolsa de instilación vesical desechable precargada con 50 ml de solución al 0,16% (80 mg/50 ml) de ácido hialurónico. Cada bolsa contiene la solución estéril INSTYLAN. El dispositivo médico ha sido esterilizado a vapor.

INDICACIONES

INSTYLAN está indicado para instilación vesical proporcionando una película viscosa y elástica en la superficie de la mucosa para :

- protegerla de las lesiones externas durante intervenciones quirúrgicas (ureteroscopia, cistoscopia, resección transuretral de adenoma, radioterapia de los órganos de pelvis menor, etc.),
- protegerla del daño causado por el contenido de la vejiga urinaria (orina) en los casos de inflamación de la mucosa como en cistitis.

INSTYLAN está indicado para instilación vesical a través de un catéter urinario, lo que proporciona una protección temporal y recuperación de la mucosa vesical durante varios procedimientos quirúrgicos (cistoscopia de la uretra, radioterapia, etc.)

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DEL USO

- No utilice la solución si no está incolora y transparente.
- No utilice el producto si ha estado abierto previamente o el envase se encuentra dañado.
- El producto debe utilizarse inmediatamente después de su apertura.
- Este es un sistema de un solo uso. Una vez abierto y después de su uso éste ya no es estéril. No utilice los restos del producto.
- No reutilice el producto. Una vez abierto, cualquier cantidad restante del producto no utilizado no es apto para su uso, porque ya no es estéril.
- No re-esterilizar. La esterilización repetida puede ser causa de contaminación cruzada.
- No congele el producto.
- Este producto no debe administrarse por vía oral.

solución estéril a base del ácido hialurónico para instilación intravesical

PRECAUCIONES ESPECIALES

- No utilice la solución en caso de hipersensibilidad al ácido hialurónico o en pacientes con historial de las reacciones alérgicas a cualquiera de los ingredientes de la solución.
- La instilación de la vejiga debe ser realizada por un especialista médico en las instalaciones con los equipos apropiados y en las condiciones asépticas.
- No inyecte la solución en un vaso sanguíneo.
- No utilice el producto en las mujeres embarazadas, durante del periodo de lactancia o en niños.

REACCIONES ADVERSAS Y EFECTOS SECUNDARIOS

No se conocen.

CÓMO UTILIZAR

- Compruebe la integridad del envase antes de usarlo.
- Compruebe la fecha de caducidad indicada en la bolsa. No utilice la bolsa después de la fecha de caducidad.
- Utilice una bolsa con solución INSTYLAN.
- Asegúrese que la vejiga del paciente ha sido vaciada previamente.
- Quite el tapón.
- Irrija la vejiga del paciente usando catéter.
- En el tratamiento de cistitis: se sugiere el uso semanal durante primer mes y con menor frecuencia en los meses posteriores.
- La frecuencia del uso de la solución estéril INSTYLAN debe ser establecida por el médico especialista.

CADUCIDAD.

2 años en el envase intacto.

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura entre 5°C y 30°C (incluido), protegido de la luz directa y del calor, en el envase debidamente sellado. La fecha de caducidad es válida para el producto almacenado correctamente en el envase intacto.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Cualquier resto del producto debe ser eliminado de acuerdo con las leyes aplicables en materia de desechos sanitarios.

CE 1936