

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Nombre comercial: MITO-IN

Definición: Accesorio médico quirúrgico estéril de un solo uso y de circuito cerrado para la administración endovesical de MITOMICINA C (MMC).

Producido por: PHYSION S.r.l.

Distribuido por: Presurgy SL

USO

El accesorio médico quirúrgico es estéril, a menos que el embalaje esté dañado: por lo tanto, antes de su uso es necesario comprobar la integridad de la ampolla, que no esté dañada, y que las cápsulas estén en los asientos adecuados, que todas las conexiones sean seguras y que no haya fugas en el circuito.

PROPÓSITO

El accesorio médico quirúrgico estéril de un solo uso ha sido diseñado para permitir la administración endovesical en circuito cerrado de MITOMICINA C en cumplimiento con los requisitos de seguridad previstos por la ley n.º 626/94 para el personal hospitalario encargado de dicha administración.

MODO DE USO

- 1 Coloque el vial de mitomicina C (MMC) que se va a administrar cerca de la ampolla que contiene MITO-IN. Retire el accesorio médico de la carcasa siguiendo los procedimientos estériles estándar y asegúrese de que todas las pinzas estén cerradas. Use guantes estériles. Se recomienda el uso de máscara y gafas protectoras.
- 2 Conecte el frasco de MMC a la pinza blanca.
- 3 Llene una jeringa LL estéril con 10-40ml de solución salina y enrósquela a la conexión luer después de desenroscar la cápsula protectora.
- 4 Asegúrese de que la pinza verde esté CERRADA durante este paso.
- 5 Después de abrir las 2 pinzas blancas, inyecte lentamente la solución salina en el frasco de MMC para permitir una mezcla

homogénea, y luego aspire el contenido de la solución mezclada en la jeringa. Este procedimiento debe repetirse dos o tres veces para asegurar una mezcla uniforme y completa de la MMC.

- 6 Cierre la abrazadera (blanca) en la conexión que lleva al vial.
- 7 Retire la cápsula y conecte el conector de la pinza verde al conector del catéter que se incluye en el paquete de MITO-IN.
- 8 Abra la pinza (verde) del catéter urológico.
- 9 Inyecte la solución que contiene el medicamento siguiendo el procedimiento estándar de administración endovenosa.
- 10 Después de la administración, desconecte el conector del catéter.
- 11 Deseche el MITO-IN después de usarlo, asegurándose de que todas las abrazaderas estén cerradas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Accesorio médico desechable.

Paso de líquido estéril y apirogénico si el paquete está intacto y sin daños y las cápsulas están correctamente colocadas.

Todas las conexiones deben ser revisadas cuidadosamente para comprobar que estén bien apretadas antes y durante el procedimiento.

Se requiere una técnica estéril durante el procedimiento.

Producido por:

Physion s.r.l. Marcado CE 0051

Materiales biocompatibles que cumplen con las normas F.E. y USP.

Paquete de 10 piezas en un blister estéril desechable.

Mito-In




Distribuido por :
Presurgy SL
www.presurgy.com
pedidos@presurgy.com - 916402087

Seguro

Simple

Circuito cerrado

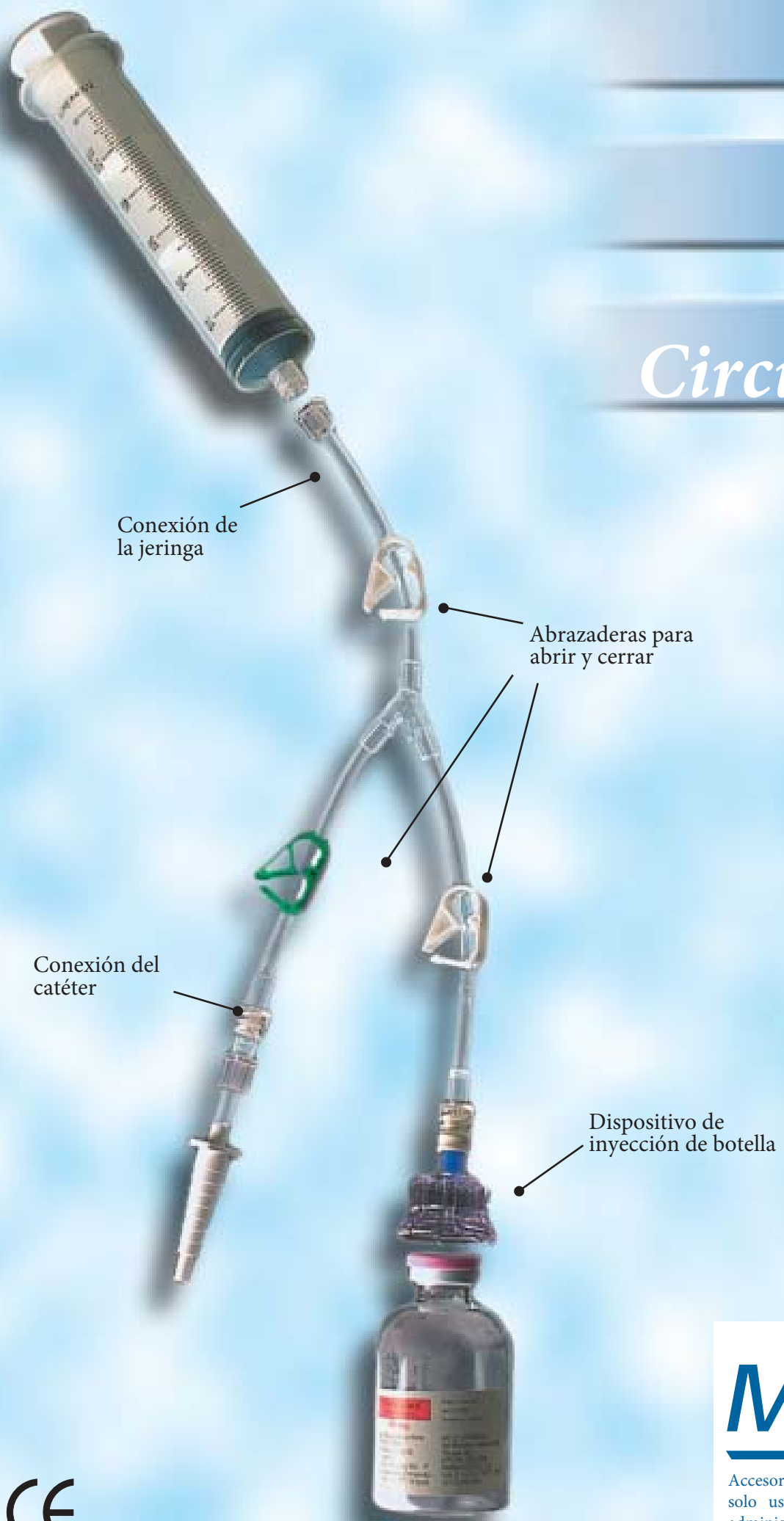

Mito-In

Accesorio médico quirúrgico estéril de un solo uso y de circuito cerrado para la administración endovesical de MMC.