

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Nombre comercial: MITO-IN

Definición: Accesorio médico quirúrgico estéril de un solo uso y de circuito cerrado para la administración endovesical de MITOMICINA C (MMC).

Producido por: PHYSION S.r.l.

Distribuido por: Presurgy SL

USO

MITO-IN está destinado a su uso en circuito cerrado para reconstituir/mezclar medicamentos, incluidos los antineoplásicos, siempre que sean compatibles con los materiales de construcción del dispositivo (PVC, PC, ABS) y, cuando se utilice en combinación con un catéter urológico, con el subsiguiente drenaje y recogida de orina y residuos de medicamentos una vez finalizado el tratamiento terapéutico.

MODO DE USO

- 1 Coloque el vial de mitomicina C (MMC) que se va a administrar en la ampolla en forma de campana que contiene MITO-IN. Retire el accesorio médico de la carcasa siguiendo los procedimientos estériles estándar y asegúrese de que todas las pinzas estén cerradas. Use guantes estériles. Se recomienda el uso de máscara y gafas protectoras.
- 2 Conecte el frasco de MMC a la pinza blanca.
- 3 Llene una jeringa LL estéril con 10-40ml de solución salina y enrrosquela a la conexión luer después de desenroscar el tapón protector.
- 4 Asegúrese de que la pinza verde esté CERRADA durante este paso.
- 5 Después de abrir las 2 pinzas blancas, inyecte lentamente la solución salina en el frasco de MMC para permitir una mezcla

PROPÓSITO

El accesorio médico quirúrgico estéril de un solo uso ha sido diseñado para permitir la administración endovesical en circuito cerrado de MITOMICINA C en cumplimiento con los requisitos de seguridad previstos por la ley n.º 626/94 para el personal hospitalario encargado de dicha administración.

homogénea, y luego aspire el contenido de la solución mezclada en la jeringa. Este procedimiento debe repetirse dos o tres veces para asegurar una mezcla uniforme y completa de la MMC.

- 6 Cierre la abrazadera (blanca) en la conexión que lleva al vial.
- 7 Retire el tapón y conecte el conector de la pinza verde al conector del catéter que se incluye en el paquete de MITO-IN.
- 8 Abra la pinza (verde) al catéter urológico.
- 9 Inyecte la solución que contiene el medicamento siguiendo el procedimiento estándar de administración endovenosa.
- 10 Después de la administración, desconecte el conector del catéter.
- 11 Deseche el MITO-IN después de usarlo, asegurándose de que todas las abrazaderas estén cerradas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Accesorio médico desechable.

Paso de líquido estéril y apirogénico si el paquete está intacto y sin daños y si todas las partes están correctamente ensambladas.

Todas las conexiones deben ser revisadas cuidadosamente para comprobar que estén bien apretadas antes y durante el procedimiento.

Se requiere una técnica estéril durante el procedimiento.

Producido por:

Physion s.r.l. Marcado CE 0051

Materiales biocompatibles que cumplen con las normas F.E. y USP.

Paquete de 10 piezas en un blister estéril desechable.

Mito-In




Distribuido por :
Presurgy, S.L
www.presurgy.com
pedidos@presurgy.com - 916402087

Seguro

Simple

Circuito cerrado

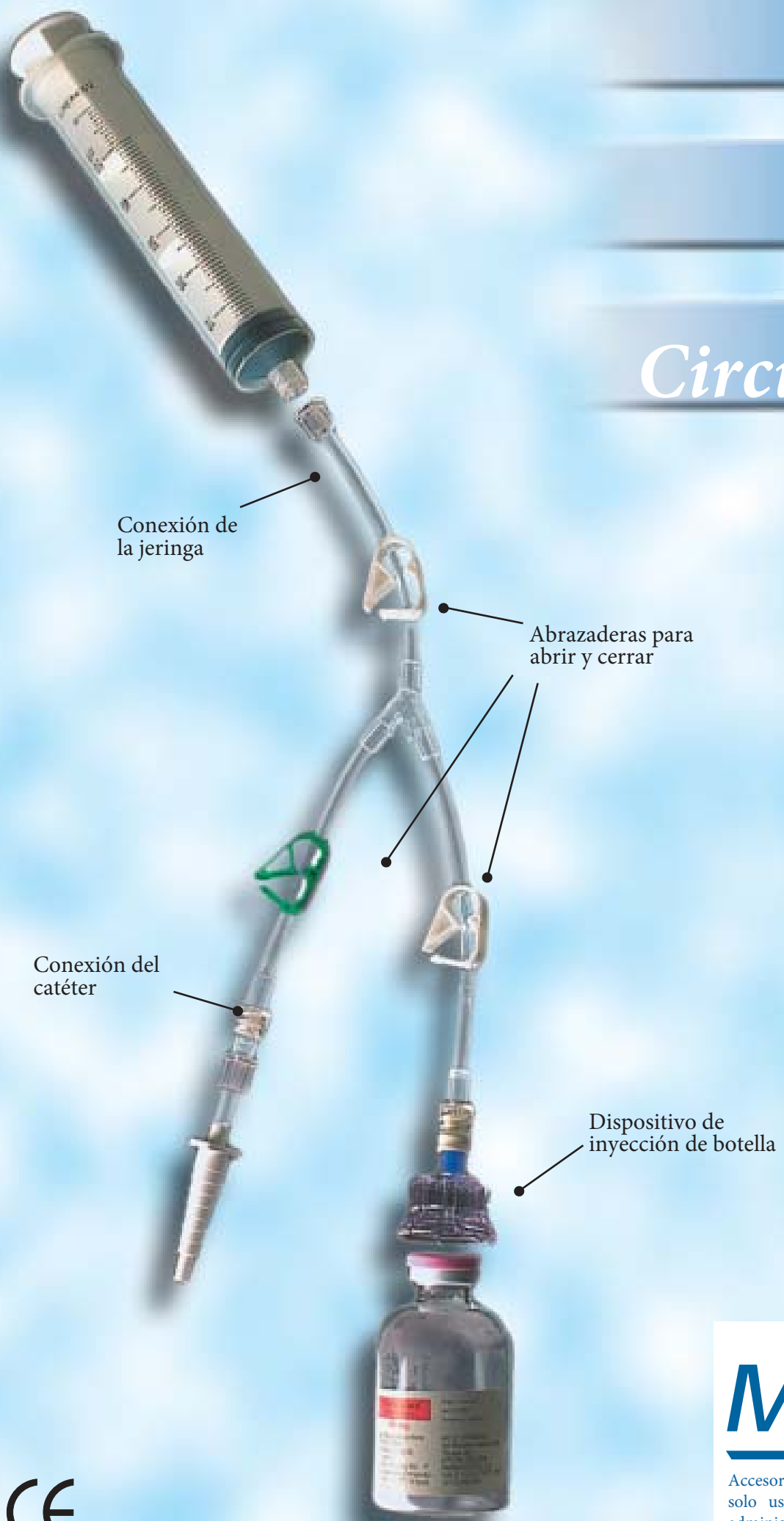

Mito-In

Accesorio médico quirúrgico estéril de un solo uso y de circuito cerrado para la administración endovesical de MMC.