

PHYSION[®]

EMDA PARA CÁNCER DE VEJIGA NO MÚSCULO INVASIVO DE RIESGO INTERMEDIO

DILUCIÓN:

- Diluir 40 mg de mitomicina en:
 - 100 ml de agua bidestilada si el excipiente es cloruro de sodio
 - 100 ml de cloruro de sodio 0.9% si el excipiente es urea o manitol

PARÁMETROS

Electrodo- Catéter	CEDAS UROGENICS/ S – Version PH00971301
Fuerza de corriente	23 mA / PULSADA
Tiempo de tratamiento	20 min
Polaridad	POSITIVA
Velocidad máxima	40 μ A/sec

PROCEDIMIENTO

- Inicie el protocolo dentro de las 2-4 semanas posteriores a la resección endoscópica.
- Antes de la 1ª instilación: CULTIVO ORINA

INDUCCIÓN

- 1 instilación por semana durante 8 semanas (un total de 8 tratamientos EMDA MMC)

Week	1	2	3	4	5	6	7	8	
	EMDA MITO	EMDA MITO	EMDA MITO	EMDA MITO	EMDA MITO	EMDA MITO	EMDA MITO	EMDA MITO	Citología Cultivo de orina Cistoscopia

Las pruebas de control se realizarán al menos 2 semanas/10 días después de la última instilación:

- CITOLOGÍA URINARIA en 3 muestras
- CULTIVO DE ORINA

Las pruebas de control se realizarán al menos 2 semanas después de la última instilación:

- CISTOSCOPIA (a 3 meses)

MANTENIMIENTO

- 1 instilación de mitomicina con EMDA al mes durante 3 meses
- Ciclo a repetir 2 veces



PHYSION[®]

Primer ciclo mantenimiento

- Comience el primer ciclo de mantenimiento dentro de 1 mes / 1 mes y medio desde la última instilación
- El mantenimiento puede comenzar después del control cistoscópico

Mes	1°	2°	3°	
	EMDA MITO	EMDA MITO	EMDA MITO	Citología Cultivo Orina Cistoscopia

Los exámenes de control se llevarán a cabo después de 10 días / 2 semanas desde la última instilación:

- CITOLOGÍA URINARIA en 3 muestras
- CULTIVO ORINA

Las pruebas de control se realizarán al menos 2 semanas después de la última instilación:

- CISTOSCOPIA (a 6 meses)

Segundo ciclo mantenimiento

- Mantenimiento puede comenzar después del control cistoscópico

Mes	1»	2»	3»	
	EMDA MITO	EMDA MITO	EMDA MITO	Citología Cultivo Orina Cistoscopia

Las pruebas de control se realizarán al menos 2 semanas/10 días después de la última instilación:

- CITOLOGÍA URINARIA en 3 muestras
- CULTIVO ORINA

Las pruebas de control se realizarán al menos 2 semanas/10 días después de la última instilación:

- CISTOSCOPIA (a 9 meses)



PHYSION®

PRUEBAS DE CONTROL

- Se repetirá **cada 3 meses durante los primeros 2 años**
 - CITOLOGÍA URINARIA en 3 muestras
 - CISTOSCOPIA
- Se repetirá **cada 6 meses desde el 3 ° hasta el 5 ° año**
 - CITOLOGÍA URINARIA en 3 muestras
 - CISTOSCOPIA
- Se repetirá **todos los años desde el 6 ° hasta el 10 ° año**
 - CITOLOGÍA URINARIA en 3 muestras
 - CISTOSCOPIA
- Uro-CT se repetirá **cada año durante los primeros años**, intercalado con ECO cada 2 años:
URO-CT/ECO



PHYSION[®]